

Rengöring förflyttningshjälpmedel

Turnslide / Fullslide / Easyslide / Minislide

Skyddsöverdraget avtorkas med LT-cin efter varje användning. Skyddsöverdraget kan också tvättas i maskin i 70°. Innan maskintvätt spritavtorkas överdraget eftersom 70° C inte avdödar alla typer av mikroorganismer.

Glidmattan tvättas i maskin i 60° och torktumlas i 90° C. Tvätta mattan om den blivit nedsmutsad och minst en gång per vecka.

Rollerslide

Skydds fodral avtorkas med LT-cin efter varje användning. Fodralet kan även tvättas i maskin i 70° C. Innan maskintvätt spritavtorkas fodralet eftersom temperaturen inte avdödar alla typer av mikroorganismer.

Easy Belt (plastad)

Avtorkas med LT-cin efter varje användning. Kan även tvättas i maskin i 70° C.

Flexi Belt (tyg)

Används patientbundet och tvättas i maskin i 70° C en gång per vecka. Används helst inte hos infekterad patient eftersom den endast går att tvätta i 70° C.

Minimove

Avtorkas med LT-cin efter varje användning eller tvättas i maskin i 60° C och torktumlas i 60° C. Spritavtorka före maskintvätt eftersom temperaturen inte avdödar alla mikroorganismer.

Easy Glide (glidskiva)

Kan tvättas i vatten och avtorkas med LT-cin för desinfektion.

Maximove "Vendelalyften"

Vendelalyften kan tvättas i maskin i 60° C och torktumlas i 60° C. Tvättas vid behov. Innan maskintvätt tas den styva mattan bort och dragkedjorna stängs.

"Vendela" avtorkas med LT-cin efter varje användning.

Bertilplattan (fotstöd)

Tvättas av med vatten och rengöringsmedel och avtorkas med LT-cin.

Antihalkmattor / Stoppkuddar

Rengöres med vatten och rengöringsmedel. Avtorkas med LT-cin för desinfektion.

forts Rengöring förflyttningshjälpmedel

Eli Glide

Tvättas efter varje patient i +85° C och torktumlas.

OBS!

Om patienten har clostridium difficile används Perform 2% eller Virkon 3% i stället för LT-cin. Alkoholbaserade desinfektionsmedel har ingen effekt på sporbildande bakterier.